

医療機器自主回収のお知らせ

植込み型心臓ペースメーカー

都内の医療機器製造販売業者から植込み型心臓ペースメーカーを自主回収する旨、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（以下「医薬品医療機器等法」という。）に基づく報告がありましたのでお知らせします。

1 概要

日本メドトロニック株式会社（港区）は、同社が輸入した「メドトロニック Adapta DR」、
「メドトロニック Adapta VDD」及び「メドトロニック Versa DR」の、特定の集積回路を使用した製品について、海外製造所から、特定のモード設定のもとで心房センシングイベントを感知している最中に一定の条件を満たした場合、心房と心室のペーシングが停止する可能性がある旨の情報を入手し、平成31年1月18日に自主回収に着手しました。

今般、新たに、回収中製品の他の製造番号775個、及び、「メドトロニック Sensia DR」3個においても、同様の不具合の可能性が否定できない旨の情報を海外製造所から入手したことから、同社は、当該製品を自主回収（回収及び患者モニタリング）することを決定し、平成31年2月4日、東京都に対し、医薬品医療機器等法の規定に基づいて報告を行いました。

なお、平成31年1月18日の自主回収報告分を含め、現在までに日本国内において、本事象との関連が否定できない失神の報告を1件受領しています。また、海外において4件の不具合が発生したとの報告がありますが、死亡事例等重篤な健康被害の報告はありません。

2 自主回収品等（平成31年1月18日の自主回収報告分を含む。）

(1) 医療機器の販売名等

ア 販売名

(a)メドトロニック Adapta DR

(モデル番号 ADDR01、ADDR01P、ADDR03、ADDR06、ADDRL1、ADDRS1)

(b)メドトロニック Adapta VDD (モデル番号 ADVDD01)

(c)メドトロニック Versa DR (モデル番号 VEDR01)

(d)メドトロニック Sensia DR (モデル番号 SEDR01) 【追加】

イ 一般的名称 植込み型心臓ペースメーカー

ウ 回収対象数量 (a) 1743個【706個追加】 (b) 133個【42個追加】

(c) 57個【27個追加】 (d) 3個【新規追加】

エ 製造番号 別紙参照

オ 輸入先製造業者 Medtronic, Inc. (アメリカ)

カ 出荷時期 平成29年7月28日から平成31年1月7日まで

キ 用途等 心臓に周期的に人工的な電気刺激を与えることによって、正常に近い心臓の収縮リズムを回復させ、患者を日常生活に復帰させることを目的に、胸部又は腹部に植え込んで使用する植込み型心臓ペースメーカーである。

(2) 納入施設数 820施設【294施設追加】

(3) 回収分類 クラス I

〔問合せ先〕

福祉保健局健康安全部薬務課

電話 03-5320-4514

3 製造販売業者の名称及び所在地

名 称 日本メドトロニック株式会社（代表取締役社長 トニー セメド）
所 在 地 東京都港区港南一丁目2番70号

4 上記製造販売業者の対応窓口

【品質保証に関して】

名 称 日本メドトロニック株式会社
所 在 地 東京都港区港南一丁目2番70号
担 当 者 品質保証統括本部 品質改善部 新福、高城
電 話 番 号 03-6776-0040（品質保証統括本部 代表）

【本件に関する患者様のお問合せ窓口】

本件専用のフリーダイヤル
電 話 番 号 0120-911-381

【医療関係者】

上記製造販売業者の営業担当者までお問合せください。

【報道関係者】

担 当 者 広報グループ 小野、市丸
電 話 番 号 03-6776-0002（広報 代表）

※ 同製品は、当課で保管しております。

【参考】

1 回収報告の法的根拠

医薬品医療機器等法第68条の11

医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器若しくは再生医療等製品の製造販売業者、外国特例承認取得者又は第80条第1項から第3項までに規定する輸出用の医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器若しくは再生医療等製品の製造業者は、その製造販売をし、製造をし、又は承認を受けた医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品を回収するとき（第70条第1項の規定による命令を受けて回収するときを除く。）は、厚生労働省令で定めるところにより、回収に着手した旨及び回収の状況を厚生労働大臣に報告しなければならない。

（医薬品医療機器等法施行令第80条第3項第2号の規定により、報告先は都道府県知事に委任されている。）

2 回収の定義

- (1) 回収：製造販売業者等が製造販売をし、製造をし、又は承認を受けた医薬品等を引き取ること。
 - (2) 改修：医療機器を物理的に他の場所に移動することなく、修理、改良、調整、廃棄又は監視を行うこと。
 - (3) 患者モニタリング：医療機器又は再生医療等製品を患者から摘出することなく、当該医療機器又は再生医療等製品を使用している患者の経過を観察すること。
- ※ 医薬品医療機器等法上、上記の回収・改修・患者モニタリングを総称して「回収」と定義している。

3 回収クラス分類について

回収に当たっては、回収される製品によりもたらされる健康への危険性の程度により、以下のとおり3つに分類される。

クラスⅠ：その製品の使用等が、重篤な健康被害又は死亡の原因となり得る状況をいう。

クラスⅡ：その製品の使用等が、一時的な若しくは医学的に治癒可能な健康被害の原因となる可能性がある状況又はその製品の使用等による重篤な健康被害のおそれはまず考えられない状況をいう。

クラスⅢ：その製品の使用等が、健康被害の原因となるとはまず考えられない状況をいう。

※ 平成26年11月21日薬食発1121第10号厚生労働省医薬食品局長通知「医薬品・医療機器等の回収について」からの抜粋

NWA016800G	NWA016801G	NWA016802G	NWA016803G	NWA016804G	NWA016807G	NWA016810G	NWA016811G
NWA016812G	NWA016814G	NWA016816G	NWA016817G	NWA016818G	NWA016819G	NWA016820G	NWA016821G
NWA016825G	NWA016826G	NWA016832G	NWA016834G	NWA016835G	NWA016836G	NWA016838G	NWA016843G
NWA016844G	NWA016845G	NWA016855G	NWA016856G	NWA016857G	NWA016866G	NWA016868G	NWA016870G
NWA016873G	NWA016874G	NWA016906G	NWA016907G	NWA016909G	NWA016911G	NWA016912G	NWA016914G
NWA016916G	NWA016919G	NWA016920G	NWA016922G	NWA016923G	NWA016926G	NWA016927G	NWA016929G
NWA016930G	NWA016933G	NWA016934G	NWA016942G	NWA016948G	NWA016949G	NWA016950G	NWA016951G
NWA016952G	NWA016964G	NWA016967G	NWA016978G	NWA016979G	NWA016989G	NWA016993G	NWA017002G
NWA017006G	NWA017007G	NWA017029G	NWA017035G	NWA017068G	NWA017074G	NWA017080G	NWB101726G
NWB102200G	NWB102201G	NWB102202G	NWB102203G	NWB102204G	NWB102205G	NWB102206G	NWB102208G
NWB102210G	NWB102212G	NWB102216G	NWB102217G	NWB102218G	NWB102221G	NWB102222G	NWB102223G
NWB102224G	NWB102225G	NWB102226G	NWB102229G	NWB103070G	NWB103310G	NWB103312G	NWB103314G
NWB103316G	NWB103318G	NWB103320G	NWB103321G	NWB103322G	NWB103323G	NWB103325G	NWB103326G
NWB103327G	NWB103329G	NWB103330G	NWB103333G	NWB103336G	NWB103339G	NWB103340G	NWB103341G
NWB103343G	NWB103344G	NWB103346G	NWB103348G	NWB103349G	NWB103350G	NWB103351G	NWB103352G
NWB103357G	NWB103358G	NWB103359G	NWB103360G	NWB103361G	NWB103362G	NWB103363G	NWB103364G
NWB103365G	NWB103367G	NWB103490G	NWB103491G	NWB103492G	NWB103493G	NWB103495G	NWB103496G
NWB103497G	NWB103500G	NWB103501G	NWB103502G	NWB103503G	NWB103504G	NWB103507G	NWB103508G
NWB103511G	NWB103976G	NWB103977G	NWB103979G	NWB103980G	NWB103982G	NWB103985G	NWB103986G
NWB103987G	NWB103988G	NWB103991G	NWB103992G	NWB103993G	NWB103994G	NWB104241G	NWB104242G
NWB104243G	NWB104244G	NWB104246G	NWB104247G	NWB105663G	NWB105664G	NWB105666G	NWB105667G
NWB105668G	NWB105669G	NWB105670G	NWB105672G	NWB105673G	NWB105675G	NWB105676G	NWB105677G
NWB105678G	NWB105680G	NWB105684G	NWB105685G	NWB105686G	NWB105688G	NWB105690G	NWB105691G
NWB106099G	NWB106101G	NWB106102G	NWB106103G	NWB106104G	NWB106106G	NWB106107G	NWB106108G
NWB106111G	NWB106112G	NWB106117G	NWB106118G	NWB106119G	NWB106124G	NWB106126G	NWB106582G
NWB106583G	NWB106584G	NWB106585G	NWB106586G	NWB106587G	NWB106589G	NWB106805G	NWB106806G
NWB106808G	NWB106809G	NWB106810G	NWB106811G	NWB106812G	NWB106813G	NWB106814G	NWB106815G
NWB106816G	NWB106817G	NWB106818G	NWB106819G	NWB106820G	NWB106821G	NWB106822G	NWB106823G
NWB107829G	NWB107834G	NWB107837G	NWB107853G	NWB107854G	NWB107865G	NWB107898G	NWB107931G
NWB107932G	NWB107935G	NWB107936G	NWB107952G	NWB107954G	NWB107958G	NWB107960G	NWB107963G
NWB107964G	NWB107965G	NWB107966G	NWB107968G	NWB107969G	NWB107972G	NWB107973G	NWB107976G
NWB107978G	NWB107980G	NWB107981G	NWB107984G	NWB107985G	NWB107986G	NWB107987G	NWB107989G
NWB107990G	NWB108162G	NWB108165G	NWB108167G	NWB108168G	NWB108172G	NWB108173G	NWB108175G
NWB108177G	NWB108179G	NWB108181G	NWB109490G	NWB109493G	NWB109496G	NWB109498G	NWB109504G
NWB109574G	NWB109576G	NWB109592G	NWB109612G	NWB109613G	NWB109618G	NWB109624G	NWB109629G
NWB109733G	NWB109765G	NWB109766G	NWB109802G	NWB109803G	NWB109804G	NWB109805G	NWB109806G
NWB109807G	NWB109808G	NWB109810G	NWB109811G	NWB109812G	NWB109851G	NWB109861G	NWB110622G
NWB110623G	NWB110625G	NWB110853G	NWB110857G	NWB110859G	NWB110931G	NWB110932G	NWB110933G
NWB110934G	NWB110935G	NWB110937G	NWB110938G	NWB110939G	NWB110940G	NWB110944G	NWB110945G
NWB110946G	NWB110949G	NWB110951G	NWB110954G	NWB110955G	NWB112652G	NWB112653G	NWB112654G
NWB112657G	NWB112658G	NWB112659G	NWB112661G	NWB112663G	NWB112665G	NWB112666G	NWB112667G
NWB112668G	NWB112670G	NWB113492G	NWB113518G	NWB113562G	NWB113565G	NWB113566G	NWB113570G
NWB113576G	NWB113585G	NWB113590G	NWB113827G	NWB113828G	NWB113829G	NWB113830G	NWB113831G
NWB113832G	NWB113833G	NWB113834G	NWB113835G	NWB113836G	NWB113837G	NWB113838G	NWB113839G
NWB113840G	NWB113841G	NWB113842G	NWB113843G	NWB113844G	NWB113845G	NWB113846G	NWB114042G
NWB114046G	NWB114049G	NWB114053G	NWB114056G	NWB114060G	NWB114061G	NWB115052G	NWB115055G
NWB115059G	NWB115078G	NWB115079G	NWB115082G	NWB115084G	NWB969210S	NWB969216S	NWB969222S
NWB969223S	NWB969224S	NWB969235S	NWB969236S	NWB970248S	NWB970251S	NWB970253S	NWC703877S
NWC703878S	NWC703879S	NWC703880S	NWC703881S	NWC703882S	NWC703883S	NWC703884S	NWC703885S
NWC703886S	NWC703897S	NWC703918S	NWC703919S	NWC703920S	NWC703922S	NWC703923S	NWC703924S
NWC703925S	NWC703926S	NWC703927S	NWC703928S	NWC703943S	NWC703953S	NWC703954S	NWC703956S
NWC703958S	NWC703960S	NWC703963S	NWC703968S	NWC703969S	NWC703970S	NWC703971S	NWC703972S
NWC703973S	NWC703974S	NWC703975S	NWC704007S	NWC704008S	NWC704009S	NWC704010S	NWC704011S
NWC704013S	NWC704014S	NWC704017S	NWC704018S	NWC704019S	NWC704020S	NWC704047S	NWC704048S
NWC704049S	NWC704054S	NWC704057S	NWC704058S	NWC704060S	NWC704063S	NWC704064S	NWC704065S
NWC704066S	NWC704067S	NWC704070S	NWC704083S	NWC704084S	NWC704085S	NWC704087S	NWC704088S
NWC704090S	NWC704091S	NWC704092S	NWC704110S	NWC704112S	NWC704115S	NWC704118S	NWD007202G
NWD007204G	NWD007250G	NWD007251G	NWD007252G	NWD007262G	NWD007264G	NWD007266G	NWD007267G

NWD007268G, NWD007269G, NWD007460G, NWD007461G, NWD007462G, NWD007464G, NWD007485G, NWD007486G,
NWD007487G, NWD007577G, NWD007618G, NWD007621G, NWD007622G, NWD007623G, NWD007637G, NWD007700G,
NWD007701G, NWD007702G, NWD007705G, NWD007706G, NWD007714G, NWD007715G, NWD007716G, NWD007718G,
NWD007751G, NWD007753G, NWD007754G, NWD007822G, NWD007823G, NWE044171G, NWE044173G, NWE044174G,
NWE044176G, NWE044177G, NWE044180G, NWE044181G, NWE044182G, NWE044183G, NWE044184G, NWE044187G,
NWE044188G, NWE044189G, NWE044190G, NWE044212G, NWE044214G, NWE044216G, NWE044217G, NWE044219G,
NWE044220G, NWE044222G, NWE044224G, NWE044225G, NWE044228G, NWE044253G, NWE044259G, NWE044260G,
NWE044261G, NWE044262G, NWE044263G, NWE044264G, NWE044267G, NWE044268G, NWE044271G, NWE044272G,
NWE044274G, NWE044275G, NWE044277G, NWE045679G, NWE045682G, NWE045684G, NWE045685G, NWE045686G,
NWE045687G, NWE045688G, NWE045691G, NWE045703G, NWE045704G, NWE045705G, NWE045733G, NWE045734G,
NWE045735G, NWE045736G, NWE045737G, NWE045749G, NWE045750G, NWE045751G, NWE045752G, NWE045755G,
NWE045756G, NWE045758G, NWE045759G, NWE045760G, NWE045761G, NWE045763G, NWE045765G, NWE045766G,
NWE045768G, NWE045771G, NWE045772G, NWE045773G, NWE045774G, NWE045776G, NWE045778G, NWE045783G,
NWE045786G, NWE045788G, NWE045790G, NWE045794G, NWE045795G, NWE045796G, NWE045811G, NWE045813G,
NWE045815G, NWE045820G, NWE045822G, NWE045824G, NWE045825G, NWE045833G, NWE045834G, NWE045835G,
NWE045838G, NWE045839G, NWE045840G, NWE045841G, NWE045843G, NWE045845G, NWE045862G, NWE045881G,
NWE045889G, NWE045891G, NWE045893G, NWE045894G, NWE045903G, NWE045904G, NWE045907G, NWE045910G,
NWE050836G, NWE050837G, NWE050838G, NWE050840G, NWE050841G, NWE050842G, NWE050843G, NWE050844G,
NWE050845G, NWE050847G, NWE050848G, NWE050849G, NWE050850G, NWE051164G, NWE051166G, NWE051167G,
NWE051168G, NWE051350G, NWE051357G, NWE051366G, NWE052947G,

【追加分】

NWB101745G, NWB102207G, NWB102209G, NWB102211G, NWB102213G, NWB102214G, NWB102215G, NWB102219G,
NWB102220G, NWB102227G, NWB102228G, NWB103311G, NWB103313G, NWB103317G, NWB103319G, NWB103324G,
NWB103328G, NWB103331G, NWB103332G, NWB103334G, NWB103335G, NWB103337G, NWB103338G, NWB103342G,
NWB103345G, NWB103347G, NWB103366G, NWB103489G, NWB103494G, NWB103499G, NWB103505G, NWB103506G,
NWB103509G, NWB103510G, NWB103512G, NWB103513G, NWB103514G, NWB103975G, NWB103978G, NWB103981G,
NWB103983G, NWB103984G, NWB103989G, NWB103990G, NWB103995G, NWB104245G, NWB104248G, NWB104249G,
NWB105671G, NWB105674G, NWB105679G, NWB105681G, NWB105682G, NWB105683G, NWB105687G, NWB105689G,
NWB105692G, NWB106105G, NWB106109G, NWB106115G, NWB106116G, NWB106125G, NWB106588G, NWB106770G,
NWB106807G, NWB106824G, NWB107845G, NWB107851G, NWB107875G, NWB107877G, NWB107884G, NWB107885G,
NWB107917G, NWB107929G, NWB107940G, NWB107946G, NWB107950G, NWB107955G, NWB107957G, NWB107961G,
NWB107967G, NWB107970G, NWB107974G, NWB107979G, NWB107983G, NWB107988G, NWB107992G, NWB108161G,
NWB108169G, NWB108171G, NWB108174G, NWB108178G, NWB109489G, NWB109584G, NWB109608G, NWB109626G,
NWB109628G, NWB109767G, NWB109809G, NWB110611G, NWB110613G, NWB110616G, NWB110617G, NWB110619G,
NWB110621G, NWB110633G, NWB110861G, NWB110862G, NWB110863G, NWB110898G, NWB110941G, NWB110942G,
NWB110943G, NWB110947G, NWB110948G, NWB110950G, NWB110952G, NWB110953G, NWB112651G, NWB112655G,
NWB112656G, NWB112660G, NWB112662G, NWB112664G, NWB112669G, NWB113265G, NWB113266G, NWB113313G,
NWB113319G, NWB113342G, NWB113367G, NWB113484G, NWB113494G, NWB113495G, NWB113496G, NWB113506G,
NWB113508G, NWB113509G, NWB113510G, NWB113511G, NWB113512G, NWB113517G, NWB113563G, NWB113564G,
NWB113567G, NWB113568G, NWB113569G, NWB113571G, NWB113572G, NWB113573G, NWB113574G, NWB113575G,
NWB113577G, NWB113578G, NWB113579G, NWB113580G, NWB113581G, NWB113582G, NWB113583G, NWB113584G,
NWB113586G, NWB113587G, NWB113588G, NWB113589G, NWB113591G, NWB113819G, NWB113820G, NWB113821G,
NWB113822G, NWB113823G, NWB113824G, NWB113825G, NWB113826G, NWB113847G, NWB113848G, NWB113849G,
NWB113850G, NWB113851G, NWB113852G, NWB113853G, NWB114041G, NWB114043G, NWB114044G, NWB114045G,
NWB114047G, NWB114048G, NWB114050G, NWB114051G, NWB114052G, NWB114054G, NWB114055G, NWB114057G,
NWB114058G, NWB114059G, NWB114062G, NWB114063G, NWB114064G, NWB114065G, NWB114903G, NWB114993G,
NWB115053G, NWB115054G, NWB115056G, NWB115057G, NWB115058G, NWB115064G, NWB115065G, NWB115066G,
NWB115067G, NWB115068G, NWB115069G, NWB115070G, NWB115071G, NWB115072G, NWB115073G, NWB115074G,
NWB115075G, NWB115077G, NWB115080G, NWB115081G, NWB115083G, NWB115085G, NWB115086G, NWB115087G,
NWB115088G, NWB115089G, NWB970249S, NWB970250S, NWB970252S, NWB970254S, NWD007203G, NWD007261G,
NWD007263G, NWD007265G, NWD007349G, NWD007350G, NWD007463G, NWD007465G, NWD007484G, NWD007488G,
NWD007619G, NWD007620G, NWD007635G, NWD007636G, NWD007703G, NWD007704G, NWD007717G, NWD007750G,
NWD007752G, NWD007824G, NWC703967S, NWC704050S, NWC704069S, NWC704086S, NWC704089S, NWC704111S,
NWC704113S, NWC704114S, NWE044172G, NWE044175G, NWE044178G, NWE044179G, NWE044185G, NWE044186G,
NWE044210G, NWE044211G, NWE044213G, NWE044215G, NWE044218G, NWE044221G, NWE044223G, NWE044226G,
NWE044227G, NWE044229G, NWE044252G, NWE044255G, NWE044265G, NWE044266G, NWE044269G, NWE044270G,
NWE044273G, NWE044276G, NWE045675G, NWE045676G, NWE045677G, NWE045678G, NWE045680G, NWE045681G,

NWE045683G, NWE045689G, NWE045690G, NWE045753G, NWE045754G, NWE045757G, NWE045762G, NWE045764G,
NWE045767G, NWE045769G, NWE045770G, NWE045775G, NWE045777G, NWE045779G, NWE045780G, NWE045781G,
NWE045782G, NWE045784G, NWE045785G, NWE045787G, NWE045789G, NWE045791G, NWE045792G, NWE045793G,
NWE045797G, NWE045798G, NWE045812G, NWE045814G, NWE045816G, NWE045817G, NWE045818G, NWE045819G,
NWE045821G, NWE045823G, NWE045826G, NWE045827G, NWE045831G, NWE045832G, NWE045836G, NWE045837G,
NWE045842G, NWE045844G, NWE045858G, NWE045859G, NWE045860G, NWE045861G, NWE045882G, NWE045883G,
NWE045884G, NWE045885G, NWE045886G, NWE045887G, NWE045888G, NWE045890G, NWE045892G, NWE045896G,
NWE045902G, NWE045905G, NWE045906G, NWE045908G, NWE045909G, NWE045911G, NWE045912G, NWE045913G,
NWE045914G, NWE045916G, NWE045917G, NWE045918G, NWE045919G, NWE045921G, NWE045922G, NWE045923G,
NWE045924G, NWE045925G, NWE045926G, NWE050839G, NWE050846G, NWE050943G, NWE050944G, NWE050945G,
NWE051155G, NWE051156G, NWE051157G, NWE051158G, NWE051159G, NWE051160G, NWE051161G, NWE051162G,
NWE051163G, NWE051165G, NWE051169G, NWE051170G, NWE051171G, NWE051172G, NWE051173G, NWE051174G,
NWE051340G, NWE051341G, NWE051342G, NWE051343G, NWE051344G, NWE051345G, NWE051346G, NWE051347G,
NWE051348G, NWE051349G, NWE051351G, NWE051352G, NWE051354G, NWE051355G, NWE051358G, NWE051361G,
NWE051363G, NWE051367G, NWE052349G, NWE052350G, NWE052351G, NWE052352G, NWE052354G, NWE052355G,
NWE052356G, NWE052357G, NWE052358G, NWE052359G, NWE052376G, NWE052377G, NWE052378G, NWE052379G,
NWE052380G, NWE052694G, NWE052695G, NWE052696G, NWE052917G, NWE052918G, NWE052919G, NWE052920G,
NWE052922G, NWE052923G, NWE052925G, NWE052926G, NWE052927G, NWE052938G, NWE052939G, NWE052940G,
NWE052941G, NWE052942G, NWE052943G, NWE052944G, NWE052945G, NWE052946G, NWE052948G, NWE053016G,
NWE053017G, NWE053018G, NWE053019G, NWE053020G, NWE053021G, NWE053022G, NWE053023G, NWE053024G,
NWE053025G, NWE053026G, NWE053027G, NWE053028G, NWE053029G, NWE053030G, NWE053031G, NWE053032G,
NWE053033G, NWE053034G, NWE053035G, NWA015469G, NWA015474G, NWA015493G, NWA015571G, NWA015591G,
NWA015598G, NWA015602G, NWA015631G, NWA015642G, NWA015657G, NWA015664G, NWA015667G, NWA015678G,
NWA015684G, NWA015688G, NWA015691G, NWA015697G, NWA015927G, NWA015930G, NWA015938G, NWA015939G,
NWA015942G, NWA015944G, NWA015949G, NWA015954G, NWA015958G, NWA016088G, NWA016169G, NWA016174G,
NWA016175G, NWA016178G, NWA016180G, NWA016186G, NWA016188G, NWA016189G, NWA016193G, NWA016195G,
NWA016210G, NWA016211G, NWA016212G, NWA016214G, NWA016215G, NWA016218G, NWA016225G, NWA016227G,
NWA016245G, NWA016383G, NWA016391G, NWA016393G, NWA016395G, NWA016397G, NWA016406G, NWA016409G,
NWA016434G, NWA016449G, NWA016453G, NWA016455G, NWA016462G, NWA016491G, NWA016496G, NWA016498G,
NWA016499G, NWA016502G, NWA016503G, NWA016504G, NWA016505G, NWA016512G, NWA016514G, NWA016519G,
NWA016520G, NWA016523G, NWA016526G, NWA016527G, NWA016528G, NWA016533G, NWA016562G, NWA016564G,
NWA016566G, NWA016569G, NWA016575G, NWA016578G, NWA016598G, NWA016602G, NWA016613G, NWA016617G,
NWA016624G, NWA016630G, NWA016737G, NWA016738G, NWA016739G, NWA016741G, NWA016742G, NWA016744G,
NWA016748G, NWA016750G, NWA016751G, NWA016753G, NWA016756G, NWA016757G, NWA016759G, NWA016760G,
NWA016761G, NWA016762G, NWA016767G, NWA016775G, NWA016777G, NWA016781G, NWA016783G, NWA016785G,
NWA016787G, NWA016790G, NWA016796G, NWA016797G, NWA016798G, NWA016805G, NWA016806G, NWA016808G,
NWA016809G, NWA016813G, NWA016822G, NWA016823G, NWA016824G, NWA016827G, NWA016828G, NWA016829G,
NWA016830G, NWA016831G, NWA016833G, NWA016837G, NWA016839G, NWA016840G, NWA016841G, NWA016842G,
NWA016858G, NWA016859G, NWA016864G, NWA016865G, NWA016867G, NWA016869G, NWA016871G, NWA016872G,
NWA016875G, NWA016908G, NWA016913G, NWA016915G, NWA016917G, NWA016918G, NWA016921G, NWA016924G,
NWA016925G, NWA016928G, NWA016931G, NWA016932G, NWA016935G, NWA016936G, NWA016937G, NWA016938G,
NWA016939G, NWA016940G, NWA016943G, NWA016944G, NWA016945G, NWA016946G, NWA016947G, NWA016953G,
NWA016954G, NWA016961G, NWA016962G, NWA016963G, NWA016965G, NWA016966G, NWA016972G, NWA016973G,
NWA016974G, NWA016975G, NWA016976G, NWA016977G, NWA016980G, NWA016981G, NWA016982G, NWA016983G,
NWA016984G, NWA016985G, NWA016986G, NWA016987G, NWA016988G, NWA016990G, NWA016991G, NWA016992G,
NWA016994G, NWA017003G, NWA017004G, NWA017005G, NWA017009G, NWA017010G, NWA017011G, NWA017012G,
NWA017013G, NWA017014G, NWA017015G, NWA017016G, NWA017017G, NWA017018G, NWA017019G, NWA017020G,
NWA017021G, NWA017022G, NWA017023G, NWA017024G, NWA017025G, NWA017026G, NWA017027G, NWA017028G,
NWA017030G, NWA017031G, NWA017032G, NWA017033G, NWA017034G, NWA017036G, NWA017037G, NWA017038G,
NWA017041G, NWA017042G, NWA017043G, NWA017044G, NWA017045G, NWA017046G, NWA017047G, NWA017056G,
NWA017057G, NWA017058G, NWA017059G, NWA017060G, NWA017061G, NWA017063G, NWA017064G, NWA017065G,
NWA017069G, NWA017070G, NWA017073G, NWA017075G, NWA017077G, NWA017079G, NWA017081G, NWA017083G,
NWA017084G, NWA017085G,

販売名：メドトロニック Adapta VDD
モデル番号：ADVDD01
対象数：133 個

製造番号：

NWG024146G, NWG024147G, NWG024150G, NWG024234G, NWG024579G, NWG024580G, NWG024581G, NWG024695G,
NWG024817G, NWG024818G, NWG024819G, NWG024832G, NWG024844G, NWG024845G, NWG024973G, NWG025012G,
NWG025013G, NWG025014G, NWG025015G, NWG025016G, NWG025071G, NWG025072G, NWG025074G, NWG025075G,
NWG025261G, NWG025268G, NWG025269G, NWG025282G, NWG025285G, NWG025287G, NWG025291G, NWG025296G,
NWG025336G, NWG025343G, NWG025665G, NWG025737G, NWG025738G, NWG025740G, NWG025741G, NWG026036G,
NWG026126G, NWG026236G, NWG026237G, NWG026238G, NWG026239G, NWG026240G, NWG026291G, NWG026400G,
NWG026401G, NWG026402G, NWG026403G, NWG026404G, NWG026405G, NWG026406G, NWG026407G, NWG026546G,
NWG026553G, NWG026612G, NWG026683G, NWG026739G, NWG026742G, NWG026746G, NWG026757G, NWG026761G,
NWG026762G, NWG026764G, NWG026767G, NWG026773G, NWG026782G, NWG026784G, NWG026827G, NWG026829G,
NWG026830G, NWG026832G, NWG026833G, NWG026834G, NWG026839G, NWG026841G, NWG026843G, NWG026855G,
NWG026856G, NWG026859G, NWG026861G, NWG027080G, NWG027081G, NWG027083G, NWG028430G, NWG028433G,
NWG028434G, NWG028435G, NWG028767G,

【追加分】

NWG024816G, NWG025011G, NWG025017G, NWG025073G, NWG025076G, NWG025283G, NWG025494G, NWG025666G,
NWG025739G, NWG026155G, NWG026609G, NWG026774G, NWG026775G, NWG026838G, NWG026840G, NWG026842G,
NWG026845G, NWG026857G, NWG027082G, NWG027084G, NWG028208G, NWG028209G, NWG028210G, NWG028427G,
NWG028428G, NWG028429G, NWG028432G, NWG028436G, NWG028437G, NWG028524G, NWG028754G, NWG028755G,
NWG028756G, NWG028757G, NWG028758G, NWG028759G, NWG028760G, NWG028765G, NWG028766G, NWG028768G,
NWG028769G, NWG028770G

販売名：メドトロニック Versa DR

モデル番号：VEDR01

対象数：57 個

製造番号：

NWH013967G, NWH015000G, NWH015001G, NWH015003G, NWH015016G, NWH015017G, NWH015018G, NWH015020G,
NWH015021G, NWH015022G, NWH015023G, NWH015024G, NWH015026G, NWH015027G, NWH015028G, NWH015029G,
NWH015032G, NWH015033G, NWH015034G, NWH015038G, NWH015040G, NWH015042G, NWH015046G, NWH015048G,
NWH015064G, NWH015065G, NWH015066G, NWH015072G, NWH015073G, NWH015167G,

【追加分】

NWH015002G, NWH015030G, NWH015031G, NWH015035G, NWH015036G, NWH015037G, NWH015039G, NWH015041G,
NWH015043G, NWH015047G, NWH015067G, NWH015068G, NWH015069G, NWH015070G, NWH015071G, NWH015084G,
NWH015085G, NWH015162G, NWH015163G, NWH015164G, NWH015165G, NWH015166G, NWH015168G, NWH015169G,
NWH015200G, NWH015201G, NWH015202G

販売名：メドトロニック Sensia DR 【追加】

モデル番号：SEDR01

対象数：3 個

製造番号：

NWL400331G, NWL416991G, NWL416996G